



**Эксклюзивно в компании MEDLIGA**

Портативный бесконтактный прибор  
для визуализации вен в режиме  
реального времени

**MEDCAPTAIN NAVI-60**





Визуализатор вен

# MEDCAPTAIN NAVI-60

- ✓ **Разрешение, пикселей:** 720x576
- ✓ **Уровни яркости лампы, люмен:** 13-25 (4 регулируемых уровня яркости)
- ✓ **Глубина проникновения, мм:** 0-6, обнаружение, без верхнего предела
- ✓ **Цвета:** красный, зеленый, розовый, синий и белый, цвет вены и фона можно инвертировать
- ✓ **Время работы от аккумулятора, час:** не менее 2,5
- ✓ **Время зарядки аккумулятора, час:** не более 4
- ✓ **Вес, г:** 500
- ✓ **Размер, мм:** 224 (Ш) x 68 (В) x 64 (Г)

- обнаружение вены на руках, ногах и лице
- отслеживание кровотока
- оптимизация выбора вены
- изображение в режиме реального времени отображается на поверхности кожи
- для бесконтактного применения закрепляется на настольной подставке либо мобильной стойке



## Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



Легко переносится и не требует контакта с пациентом.  
Для более комфортного использования может быть закреплен  
на настольной подставке или передвижной стойке.



Настольная подставка



Мобильная стойка





# Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



## ✓ 5 цветов

Можно выбрать один из пяти цветов по желанию для разных типов кожи:

- белый цвет;
- зеленый цвет;
- красный цвет;
- синий цвет;
- светло-фиолетовый цвет.







# Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



## ✓ 4 уровня яркости

Можно выбрать четыре уровня яркости проецирования, соответствующие различным условиям использования.



## ✓ 3 размера окна

Три разных размера проецируемого изображения предназначены для того, чтобы изделие подходило для разных групп людей, особенно для детей и младенцев.



Нормальный  
размер


(720\*576 пикселей)

Средний  
размер

(360\*288 пикселей)

Минимальный  
размер

(360\*192 пикселей)

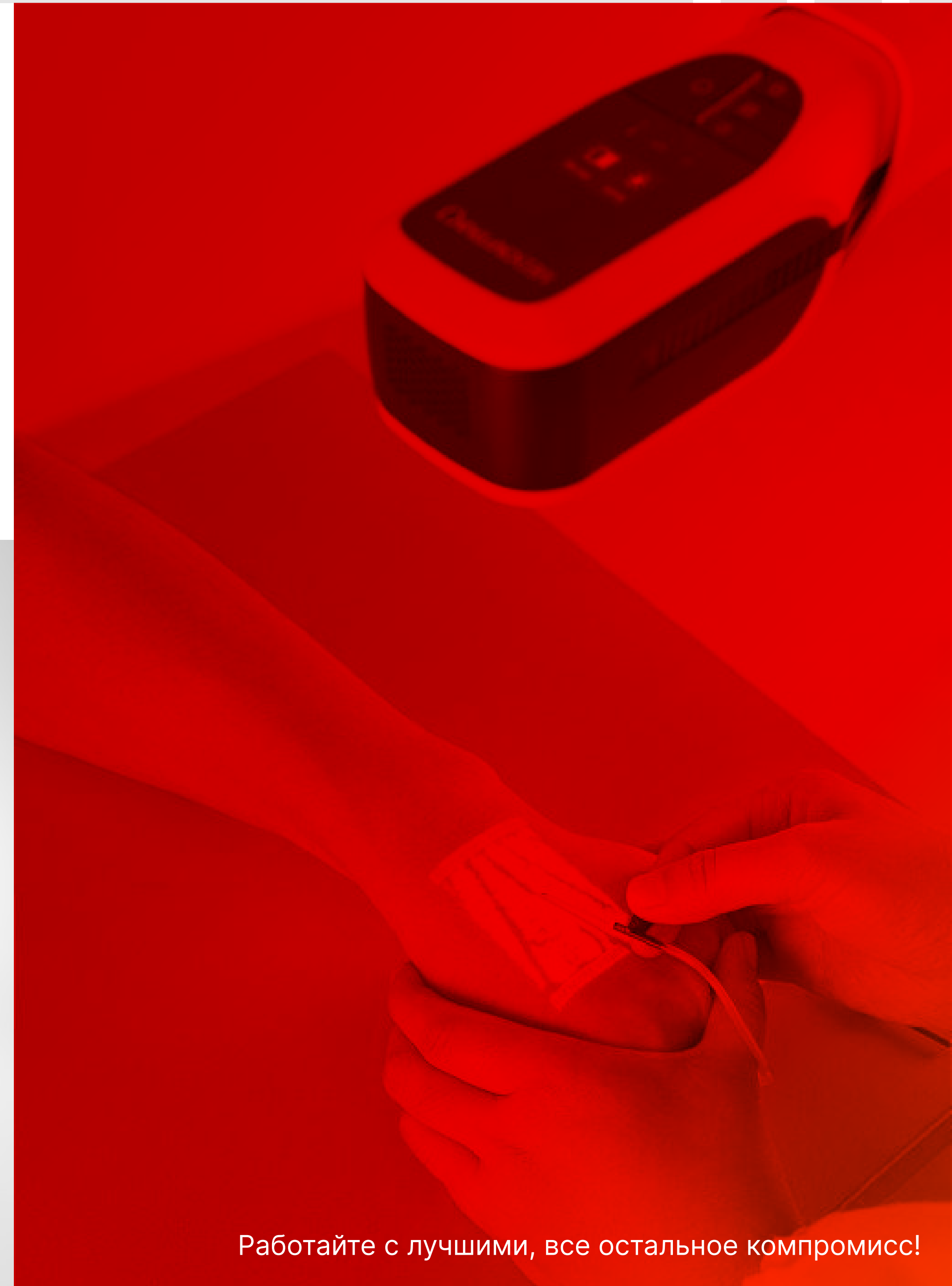



# Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



## ✓ 2 режима изображения

Помимо основного режима можно выбрать режим инверсии цвета. В этом режиме цвет вен и кожи на проектируемом изображении инвертируются.

Стандартный режим



Режим инверсии



Режим инверсии  
включается долгим  
нажатием кнопки





# Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



## ✓ 1 функциональный экран

Дает возможность быстрого просмотра текущих параметров: выбранный цвет, размер окна, уровень яркости, заряд аккумулятора.



Уровень яркости

Заряд батареи


Текущий цвет

Текущий размер



BLACK

854x480

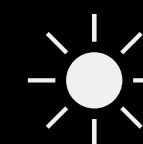

Интуитивнопонятный интерфейс позволяет разобраться с аппаратом даже неопытному сотруднику





# Визуализатор вен MEDCAPTAIN NAVI-60



## Экран

Показатели размера  
окна, цвета, уровня  
заряда, яркости



## Регулировка яркости

Кнопка выбора  
уровня яркости



## Выбор размера окна

Кнопка выбора размера  
проецируемого  
изображения



## Включение/ выключение

Кнопка питания




## Цветовой режим

Короткое нажатие: выбор  
цвета изображения  
Долгое нажатие: выбор  
режима инверсии



## Проекционное окно

Принимает инфракрасный  
световой сигнал  
и проецирует изображение

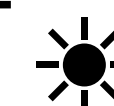

## Инфракрасные лампы

Излучают инфракрасные  
световые сигналы



## Аккумулятор



## Разъем питания





## Ограничения в использовании




Очень густой  
волосяной покров



Болезни кожи



Гиперпигментация

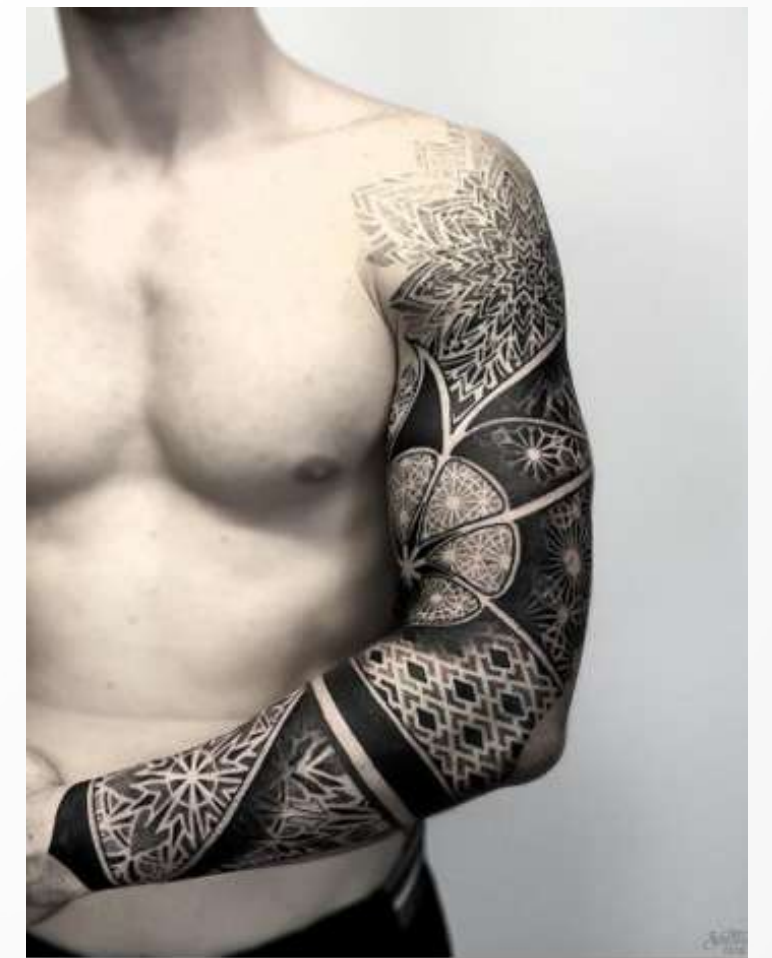

Татуировка





## Сферы применения визуализатора вен MEDCAPTAIN NAVI-60

### Педиатрия

Облегчает процесс поиска вен у маленьких пациентов

### Лаборатория

Сокращает время забора крови

### Сосудистая хирургия

Необходим для процедур склеротерапии


### Онкология

Помогает избежать ошибочных проколов





## Комплекты со стойками

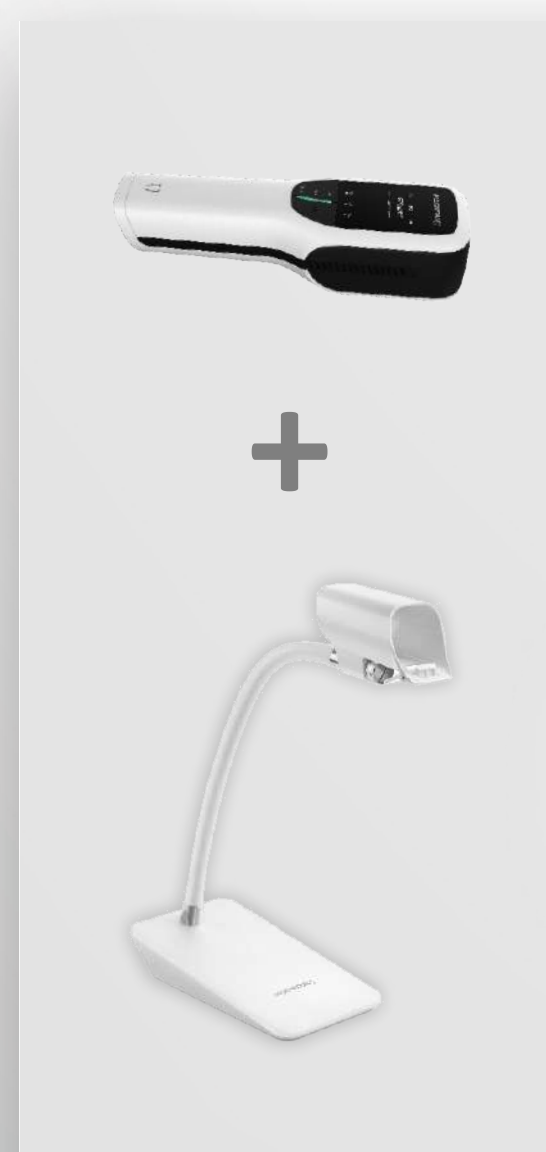

Настольная  
подставка



**3550\$**



Мобильная  
стойка



**3650\$**

Подробнее на сайте >>>

# Официальный представитель и дистрибьютор инфузионной техники MEDCAPTAIN на территории РФ

Приобретайте технику MEDCAPTAIN  
у официального дилера:



без посредников



без дополнительных трат



по ценам  
завода-производителя

Работайте с лучшими, все остальное компромисс!

麦科田  
MEDCAPTAIN

## Авторизационное письмо

Date: 20-May-2022

Настоящим письмом Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. подтверждает, что акционерное общество «МЕДЛИГА» (АО «МЕДЛИГА», ИНН 7840098139), зарегистрированное по адресу г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Владимирский округ, ул. Марата, д. 72, литера А, помещ. 6-Н, является эксклюзивным авторизационным представителем Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. в России. Имеет полные права на использование логотипа и товарного знака в рекламных, коммерческих и иных целях.

Согласно авторизационному письму АО «МЕДЛИГА» имеет право на эксклюзивный ввоз и продажу визуализатора вен Medcaptain NAVI-60 на территории Российской Федерации. Также АО «МЕДЛИГА» имеет сертифицированных инженеров для установки, ввода в эксплуатацию, гарантийного и постгарантийного обслуживания данного оборудования.

Срок действия письма до 31 декабря 2023 года.

Liu Ying  
Director, Business Operation  
Medcaptain Medical Technology Co. Ltd

Medcaptain Medical Technology Co., Ltd  
12th Floor, Baiwang Research Building  
No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan Shenzhen, P. R. China  
Tel: +86-755-26953369 Fax: +86-75526001651  
www.medcaptain.com





Работайте с лучшими, всё остальное компромисс!